


L'application de la marque auriculaire FLEXOPLUS GENO pour le prélèvement de tissus

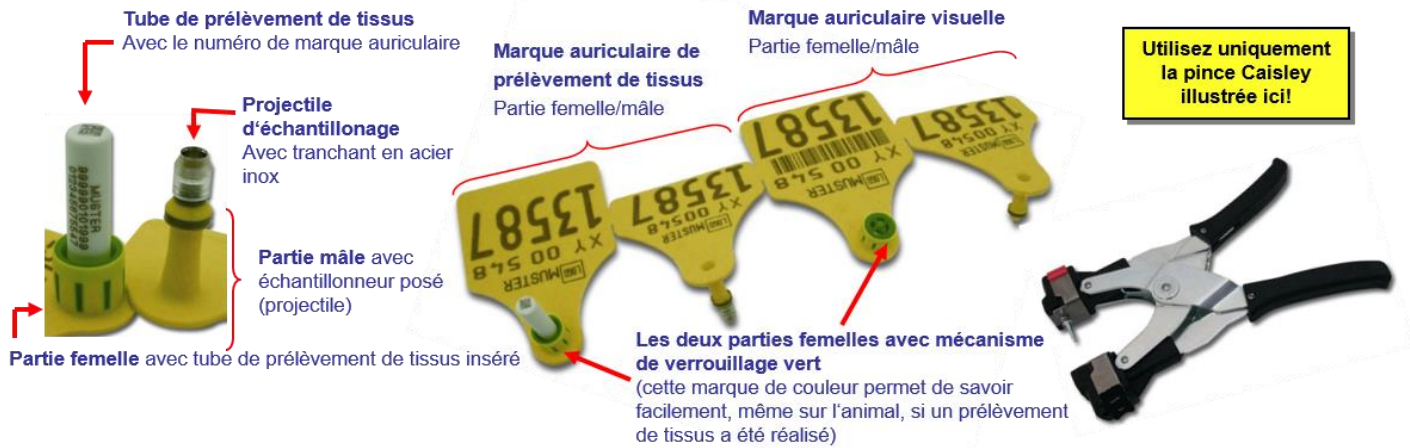

- I Détachez les quatre marques auriculaires les unes des autres au centre ❶.
Évitez de toucher la bague coupante au bout de la partie mâle.

Pose de la marque auriculaire de prélèvement de tissu

- II Chargez la **marque auriculaire de prélèvement de tissu** dans la pince Caisley. Attention à bien le faire dans l'ordre:
- Poussez** l'attache en métal de la partie femelle (clip noir) **vers l'intérieur et faites-la basculer complètement vers l'arrière!** L'attache bascule au centre de rotation de la pince ❷.
 - Insérez de l'intérieur la partie femelle avec le tube de prélèvement de tissu dans la mâchoire de la pince, et appuyez à fond ❸.
 - Relâchez l'attache. **Elle maintient la languette de la partie femelle** ❹.
 - Séparez la partie mâle de la partie femelle ❺.

- III Placez la partie mâle sur le poinçon en métal de la pince, et appuyez jusqu'à dépasser l'encliquetage ❻.

Pour éviter que la blessure auriculaire s'infecte et que l'échantillon soit contaminé, saisissez-vous de la partie mâle au niveau de la languette pour ne pas toucher à la bague coupante et au poinçon.

La pince est maintenant prête au prélèvement de tissu et à la pose de la marque auriculaire.

- IV Mettez en place la **marque auriculaire de prélèvement de tissu**
- entre les deux lignes cartilagineuses;
 - sans toucher de vaisseaux sanguins;
 - à env. entre 1/3 et 1/2 de la base de l'oreille, voire au centre de l'oreille
 - avec la partie mâle à l'extérieur de l'oreille et
 - la partie femelle à l'intérieur ❶.


ATTENTION
Refermez la pince avec la marque auriculaire une seule fois – mais de façon énergique – jusqu'à la butée!

- V **Rouvrez ensuite la pince juste après l'avoir fermée à fond jusqu'à la butée.** Retirez la pince vers le bas en formant un arc depuis l'oreille de l'animal, de sorte que la partie femelle glisse vers l'avant à partir de la mâchoire inférieure de la pince.

La bague coupante perce un trou dans l'oreille. Le tissu extrait passe dans le tube de prélèvement, qui est verrouillé hermétiquement par le projectile. Le tube de prélèvement reste dans la mâchoire de la pince.

- VI Pour retirer le tube de prélèvement de la pince, appuyez vers le haut sur le tube et le clip noir ainsi que sur le crampon, ce qui libère le tube de prélèvement de la mâchoire de la pince ❸. Puis relâchez l'attache. Le tube de prélèvement dépassant de la mâchoire peut alors être retiré facilement de la pince ❹.


Transmettez sans délai le tube de prélèvement à la société compétente pour l'examen: Qualitas SA.

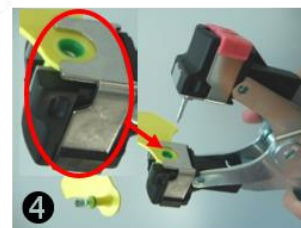

La pince fournie à la livraison est dotée d'une **bague d'appui grise** sur le poinçon en métal, qui vient étayer la partie mâle de la marque auriculaire lors de l'insertion. Si cette bague d'appui se détache à l'usage de la pince, reclipsez-la sur le poinçon.



Pose correcte

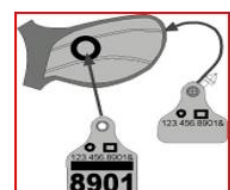

Risque de perte: ne retirez pas le tube de prélèvement de la pince au-dessus d'un plancher à caillebotis ou de la litière.